

TRAITEMENT D'UN ulcère artériel AVEC UN ENZYME ALGINOGEL®

MARGOT KEMMEREN, CONSULTANTE EN SOINS DE PLAIES
BEWEGING 3.0 AMERSFOORT



Antécédents

La patiente est âgée de 89 ans et s'est fait une plaie ouverte à la jambe droite en montant les escaliers le 15 mars 2016. La patiente a des antécédents de maladie artérielle. Elle ne peut pas être opérée étant donné son mauvais état physique. La patiente est mariée ; son époux et son voisin sont des aidants proches.

15 mars

Le traitement commence par un nettoyage de la plaie 3 fois par semaine au Prontosan®. Flaminal® Forte dans la plaie, un pansement gras par-dessus recouvert d'un pansement absorbant et d'une bande de fixation Elastomull. Un mi-bas est porté par-dessus le tout.

Concertation avec le médecin au sujet d'un renvoi vers un chirurgien vasculaire. La patiente et la famille ne le souhaitent plus. Début de prise d'ATB.

22 avril 2016

Arrêt du Prontosan® et du Flaminal® Forte. Passage au Flaminal® Hydro, car la plaie est moins humide. La patiente et son époux ont déménagé dans une résidence pour personnes âgées.

2 mai 2016

Ramollissement des berges de la plaie, car le pansement gras est appliqué en double.



15 mars 2016

T : sécrétion de fibrine jaune 80 %, tissu de granulation 20 %
(6 cm de long x 4 cm de large)
I : infection
M : plaie humide
E : irrégulière, peau partiellement à vif et gonflée



1^{er} avril 2016

T : sécrétion de fibrine jaune 60 % et tissu de granulation 40 %
(8,5 cm de long x 2,8 cm de large)
I : infection
M : plaie humide
E : moins gonflée, intacte



22 avril 2016

T : augmentation de la sécrétion de fibrine jaune 85 % et 15 % de tissu de granulation rouge. (7,4 cm de long x 2,5 cm de large)
I : absence d'infection
M : plaie humide
E : intacte



2 mai 2016

T : diminution de la sécrétion de fibrine jaune 40 % et 60 % de tissu de granulation rouge. (7 cm de long x 2,3 cm de large)
I : absence d'infection
M : plaie humide
E : un peu ramollie

20 mai 2016

La plaie montre des signes encourageants de cicatrisation. Le traitement de la plaie se poursuit avec Flaminal® Hydro.



20 mai 2017

T : 100 % de tissu de granulation rouge
(4,2 cm de long x 1,6 cm de large)

I : absence d'infection

M : humide

E : intacte



20 juin 2016

T : 100 % de tissu de granulation rouge
(1,8 cm de long x 0,3 cm de large)

I : absence d'infection

M : humide

E : épithélialisation depuis les berges de la plaie

20 juin 2016

Belle épithélialisation depuis les berges de la plaie.



4 juillet 2016

La plaie est cicatrisée

4 juillet 2016

La plaie est fermée. Arrêt des soins de la plaie. Soins cutanés quotidiens à l'aide d'une crème lambda.