

CASE REPORT

Cura di un'ustione chimica con Flaminal®

Dr Osama Ahmed Badawy Meawad, Consultant of general surgery, Egypt

Cura di un'ustione chimica con Flaminal®



PAZIENTE

- Uomo
- 38 anni



ANAMNESI

- Anamnesi di trombosi venosa, curata con warfarin ed eparina
- Esposizione all'idrossido di sodio sul lavoro con conseguente grave ustione chimica
- Primo soccorso somministrato in modo non ottimale
- **Non ha chiesto consiglio al medico fino a 3 giorni dopo l'infortunio**

Cura di un'ustione chimica con Flaminal®



Giorno 3



WOUND

- Mano destra ed avambraccio distale edematosi ed infiammati
- Ferita irregolare e con desquamazione che ricopre il dorso della mano
- Cute perilesionale eritematosa
- 1% SCT
- Estremamente doloroso

Cura

- Medicazione primaria: **Flaminal® Forte**
- Medicazione secondaria: Garza paraffinata
- Fissato con una fasciatura elastica
- La medicazione veniva cambiata 3 volte alla settimana per le prime 3 settimane
- L'essudato si è ridotto dopo 3 settimane, quindi si è passati a **Flaminal® Hydro** con cambi della medicazione ogni 4-5 giorni, continuando per altre 2 settimane



Cura di un'ustione chimica con Flaminal®

Dopo 5 settimane



Flaminal® Hydro & Flaminal® Forte:

- Adatto a qualsiasi forma e dimensione della ferita
- Per vari tipi di ferite
- Applicazione semplice

