

CASE REPORT

Gestione con Flaminal®
delle ulcere bilaterali nelle gambe infette di *Pseudomonas*.

Helen Worlmal, Tissue Viability CNS, Kings College Hospital, London

Gestione con Flaminal® delle ulcere bilaterali nelle gambe infette di *Pseudomonas*.



PAZIENTE

- Donna
- 73 anni
- Abita sola ma ha del sostegno familiare
- Ha una mobilità ridotta



ANAMNESI

- Anamnesi estesa e complessa di ipertensione, cardiopatia ischemica, infarto miocardico, gastrite, diverticolite, polimialgia, fibromialgia e osteoporosi
- È stata notata un'ulcerazione bilaterale alle gambe.
- Non sopportava lo sfigmomanometro per il dolore quindi non è stato possibile eseguire un doppler alle gambe.

Gestione con Flaminal® delle ulcere bilaterali nelle gambe infette di *Pseudomonas*.

Giorno 1



Left leg



Right leg

WOUNDS

- 1 ulcera 14cmx10cm sulla gamba sinistra- 100% slough
- 2 aree di ulcerazione 6 cm x 3 cm e 2 cm x 1,5 cm sulla gamba destra - 50% slough, 50% tessuto necrotico
- Forte essudazione
- Maleodorante
- Infetta da *Pseudomonas*
- Doloroso per la paziente, causa l'ansia



Cura

- Medicazione primaria della ferita: è stata applicata sulla ferita una miscela di Flaminal® Hydro e Flaminal® Forte (Hydro per le aree necrotiche, Forte per le aree umide e desquamate)
- Medicazione secondaria: medicazione in silicone per ridurre al minimo il dolore e il trauma per la pelle
- Tamponi chirurgici fissati con bende in crepe
- Inizialmente le medicazioni venivano cambiate ogni 2 giorni, poi ridotte a 3 volte a settimana dopo 7 giorni di trattamento
- Infusione EV continua a causa di infezione sistemica

Gestione con Flaminal® delle ulcere bilaterali nelle gambe infette di *Pseudomonas*.

Giorno 7

Left leg



Right leg



Flaminal® Hydro & Flaminal® Forte:

- Adatto a qualsiasi forma e dimensione della ferita
- Per vari tipi di ferite
- Applicazione semplice

