

CASE REPORT

Trattamento di un seno pilonidale con Flaminal®

Anna Blackshaw, Treatment Room Nurse, Helensburgh

Trattamento di un seno pilonidale con Flaminal®



PAZIENTE

- Uomo
- 29 anni
- In buona salute



ANAMNESI

- Ha sviluppato un ascesso doloroso sul lato sinistro della fessura interglutea
- Necessitava di incisione e drenaggio

Trattamento di un seno pilonidale con Flaminal®

Giorno 1



WOUND

- Ferita essudante molto dolorosa
- A rischio di infezione
- 2 cm x 2 cm
- 50% slough, 50% tessuto di granulazione

Cura

- È stato somministrato un ciclo di antibiotici
- Medicazione primaria della ferita: **Flaminal® Forte** inserito nel seno mediante con l'ausilio di un applicatore. Medicazione secondaria: schiuma adesiva
- Cambio della medicazione 3 volte a settimana
- Notata diminuzione del dolore ogni settimana con guarigione completa dopo 5 settimane



Trattamento di un seno pilonidale con Flaminal®

Giorno 3



Flaminal® Hydro & Flaminal® Forte:

- Adatto a qualsiasi forma e dimensione della ferita
- Per vari tipi di ferite
- Applicazione semplice

