

CASE REPORT

Trattamento di una ferita addominale deiscete con Flaminal®

Daniel Slater, Practice development Nurse, SWYP NHSFT

Trattamento di una ferita addominale deiscenze con Flaminal®



PAZIENTE

- Uomo
- 53 anni



ANAMNESI

- Anamnesi di diabete di tipo 1
- Sottoposto a trapianto di fegato
- Immunodepresso a causa dell'intervento di trapianto
- Ferito addominale postoperatorio deiscenze 5 giorni dopo la rimozione delle clip

Trattamento di una ferita addominale deiscenze con Flaminal®



Giorno 1



FERITA

- 12 cm x 7 cm x 2,5 cm (profondità)
- Tessuto squamoso
- Malodorante
- Essudante pesantemente

Cura

- Inizio con NPWT cambiato quotidianamente a causa dell'accumulo di essudato sotto la medicazione primaria
- Perciò la medicazione primaria della ferita è stata cambiata per Flaminal® Forte che veniva utilizzato sotto NPWT per 4 settimane
- Medicazione cambiata 3 volte a settimana per le prime 2 settimane, poi ridotti a due volte a settimana.
- Una volta interrotta la NPWT, Flaminal® Forte è diventata la medicazione primaria, messo sotto una schiuma adesiva per altre 5 settimane. Medicazione cambiata due volte la settimana.
- La ferita è guarita dopo 3 mesi, senza bisogno di antibiotici.



Trattamento di una ferita addominale deisciente con Flaminal®

Dopo 3 mesi



Flaminal® Hydro & Flaminal® Forte:

- Adatto a qualsiasi forma e dimensione della ferita
- Per vari tipi di ferite
- Applicazione semplice

