


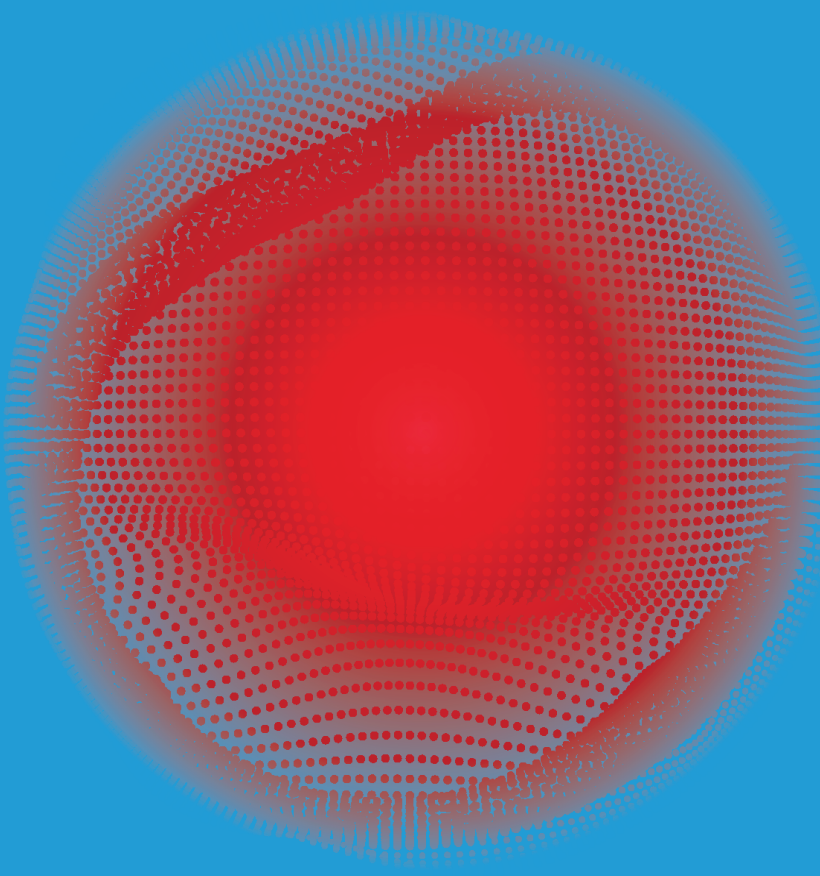


Flaminal[®]


Une dimension unique dans le soin des plaies




Évite le besoin de multiples produits !

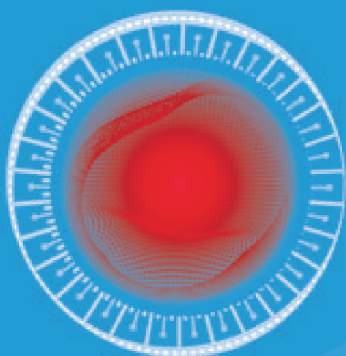

Antimicrobien

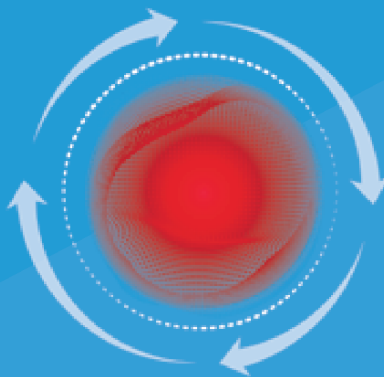

Polyvalent

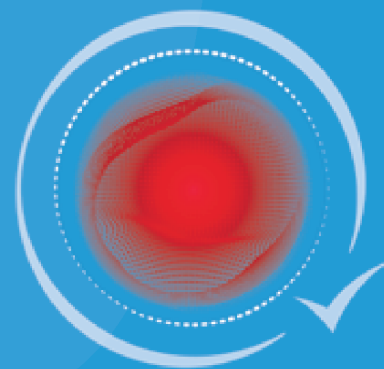

Facile à utiliser

Flaminal® Hydro et Flaminal® Forte appartiennent à un type unique de pansement primaire appelé enzyme alginogel®.

Ils contiennent un complexe enzymatique antimicrobien intégré dans des alginates et peuvent être utilisés pour le traitement des plaies aiguës et chroniques, ainsi que des plaies à risque d'infection.*



**Complexe enzymatique
antimicrobien**

Flaminal® offre une protection antimicrobienne et tue les bactéries libérées par le biofilm.^{1,2}



**Alginate
absorbant**


Flaminal® absorbe l'excès d'exsudat.³



**Gel
débridant**

Flaminal® débride en continu la plaie.³

Un complexe enzymatique antimicrobien unique ^{1,2}

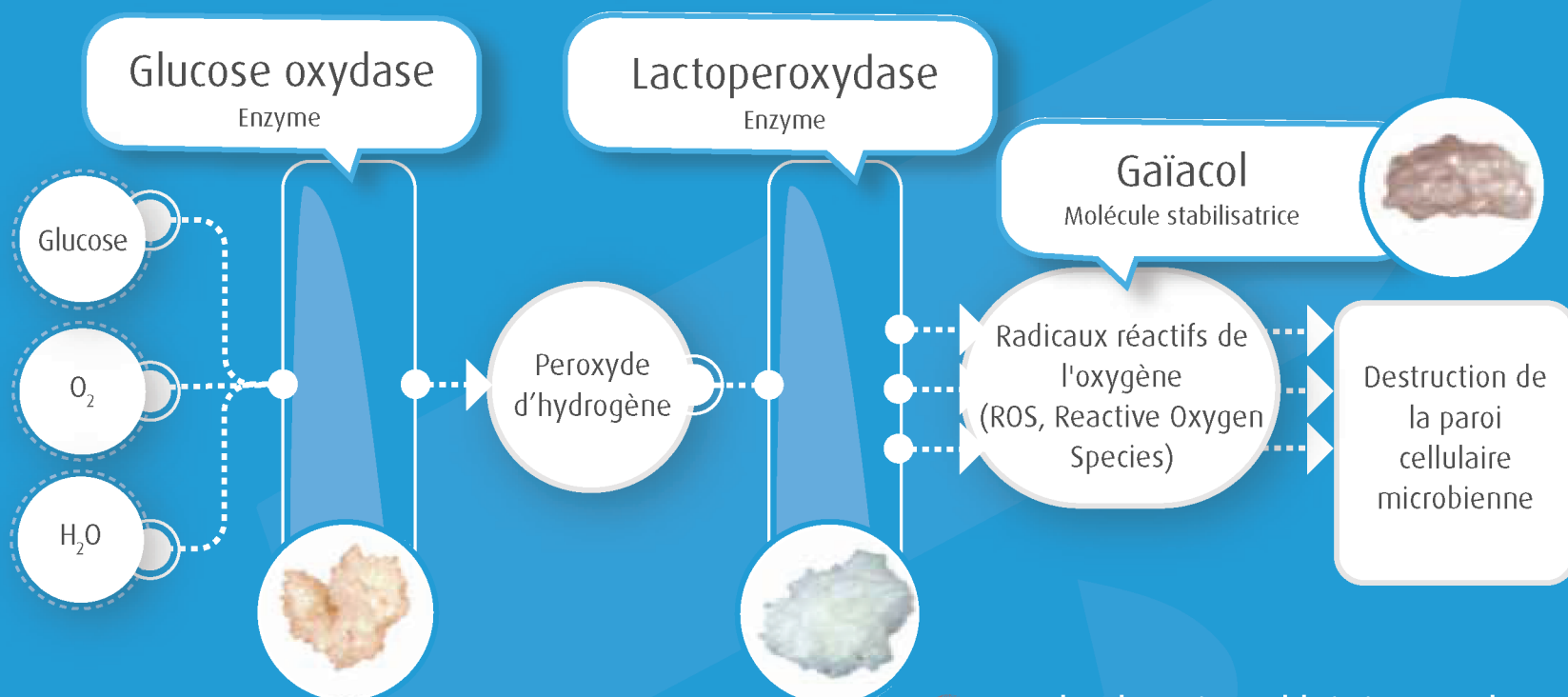


Protège contre les infections ^{1,2}

- Tue les bactéries libérées par le biofilm. ^{1,2}
- Tue un large spectre de bactéries en 6 heures. ¹
- Aucune résistance rapportée à ce jour. ^{1,6}
- Sûr pour la peau et les tissus de la plaie. ²




Bactéries Gram +

Staphylococcus aureus (MRSA)
Enterococcus faecium
Enterococcus faecalis

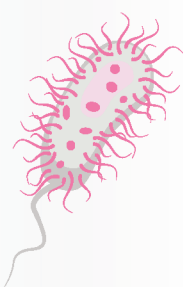


Bactéries Gram -

Escherichia coli,
Klebsiella oxytoca,
Enterobacter cloacae,
Enterobacter aerogenes, *Burkholderia multivorans*,
Pseudomonas aeruginosa
Stenotrophomonas maltophilia
Pandoraea apista
Achromobacter denitrificans

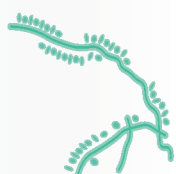



Champignons

Candida albicans

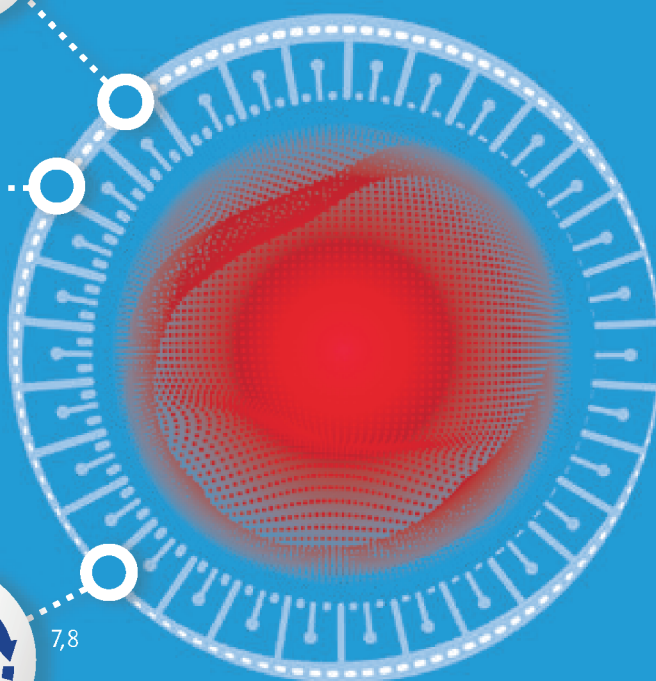

^{7,8}

Application rapide, facile et simple en 3 étapes

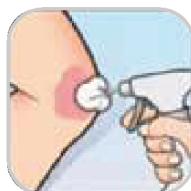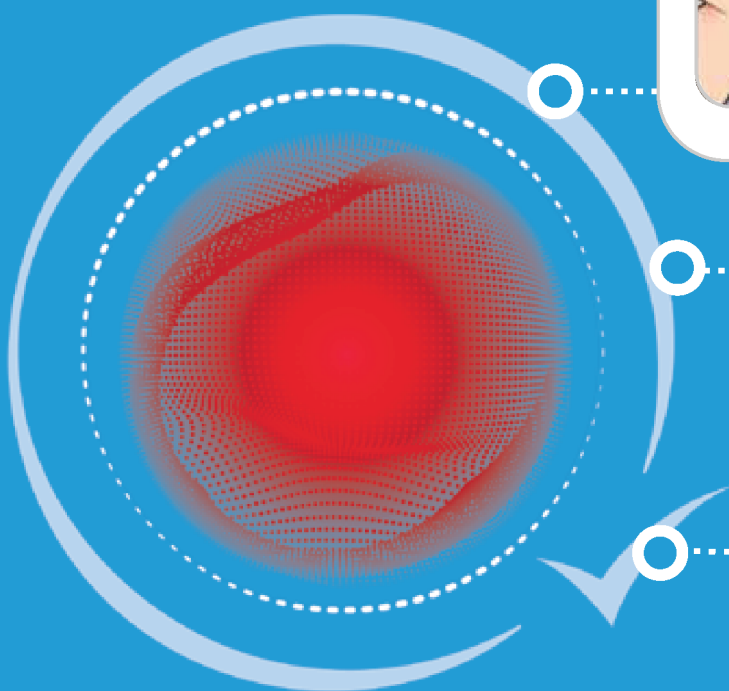


Nettoyer et choisir

Nettoyez la plaie selon le protocole local et choisissez Flaminal® Hydro ou Forte en fonction du niveau d'exsudat.



Appliquer

Couvrez entièrement le lit de la plaie d'une couche suffisamment épaisse de Flaminal® (min. 0,5cm).

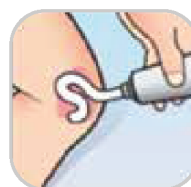

Couvrir


Couvrez la plaie d'un pansement secondaire en fonction du niveau d'exsudat.

Changement de pansement


- Contrôlez le pansement quotidiennement. S'il fuit ou s'il n'y a plus suffisamment de gel, il convient de procéder à une nouvelle application de Flaminal® Hydro/Forte et de poser un nouveau pansement.
- Ensuite: 1 à 4 jours (tant que la structure du gel est intacte).
- Évaluez 1 x/semaine l'efficacité du traitement de la plaie.
- Flaminal® s'adapte au lit de la plaie, pas nécessaire donc de le couper pour l'adapter à la forme et à la taille de la plaie.



Pour toutes les phases du continuum de l'infection des plaies

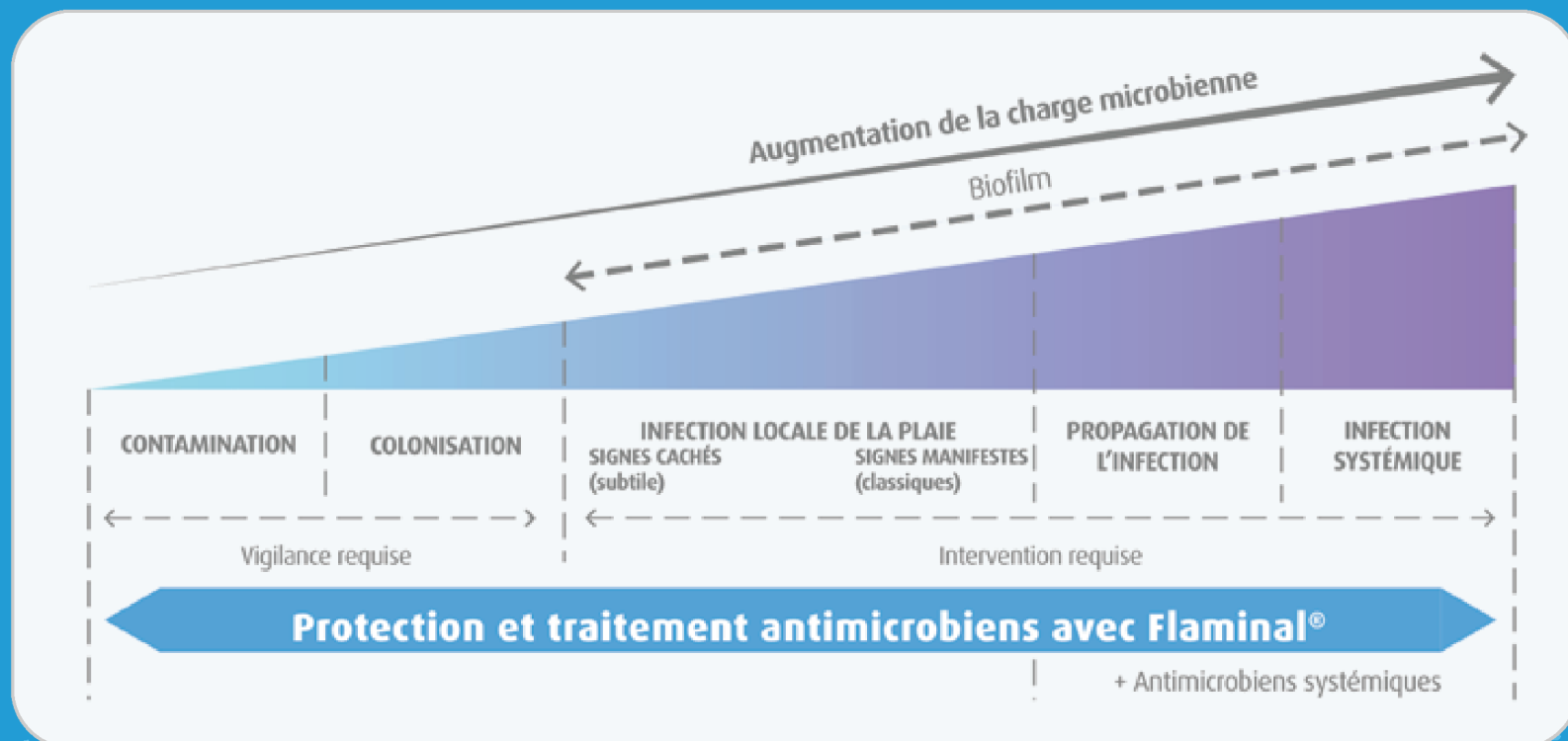

Toutes les exigences de cicatrisation des plaies réunies en une seule solution

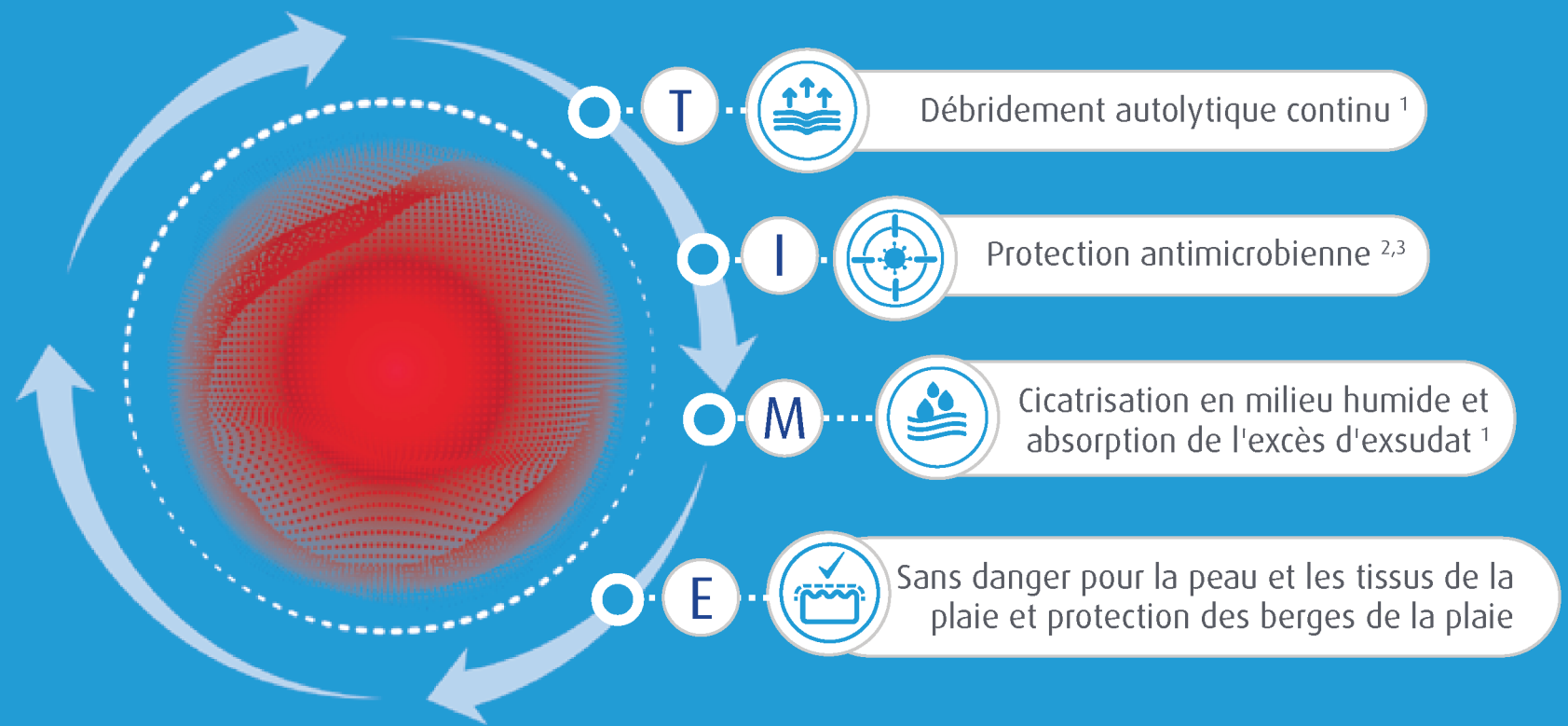

Pour une variété de types de plaies, conditions et phases ^{3,4,5}



Brûlures superficielles et de profondeur partielle



Ulcères du pied diabétique



Escarres



Plaies cavitaires



Plaies oncologiques



Plaies post-chirurgicales



Ulcères de jambe




Déchirures cutanées



Plaies traumatiques

Deux formulations pour gérer efficacement les niveaux d'exsudat

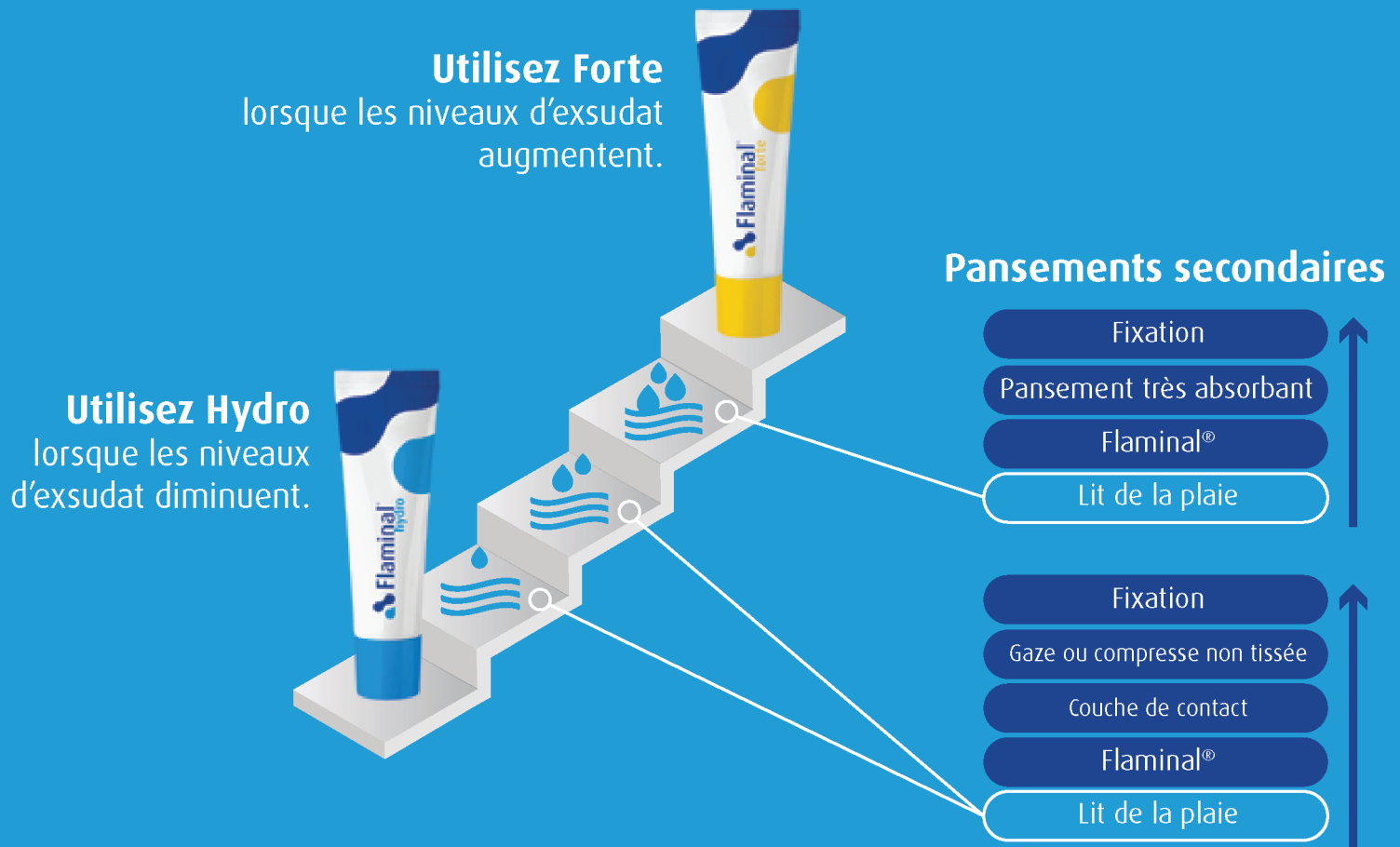

Flaminal® Hydro

Pour les plaies à exsudat faible à modéré

Format	CNK Code
Tube de 40g	4659-660
Tube de 50g	2501-013
Pot de 500g	2501-005



Flaminal® Forte

Pour les plaies à exsudat modéré à important

Format	CNK Code
Tube de 40g	4659-652
Tube de 50g	2460-459
Pot de 500g	2460-467

Contactez info@flenhealth.com pour entrer en contact avec votre représentant local de Flen Health.

Références

- Cooper RA (2013) Inhibition of biofilms by glucose oxidase, lactoperoxidase and gualacol: the active antibacterial component in an enzyme alginogel®. Int Wound J 10(6): 630-7.
- De Smet, K. et al. Pre-clinical evaluation of a new antimicrobial enzyme for the control of wound bioburden. Wounds. 2009, 21(3): 65-73.
- Flenhealth.co.uk. 2021. Instruction For Use.
- Beele, H. et al. Expert consensus on a new enzyme alginogel. Wounds International. 2012, 3(2): 42-50.
- Durante, C. An open-label, non-comparative case series on the efficacy of an enzyme alginogel. J Wound Care 2012, 21(1): 22-28.
- Gotttrup, F. et al. EWMA document: antimicrobials and nonhealing wounds – Evidence, controversies and suggestions. J Wound Care. 2013, 22 (5 suppl): S1-S92.
- Flen Health. Data on File. Internal Report: Evaluation of Fluid Absorption Capacity and Antimicrobial Activity of Aquacel products. 2017. Flen Health. Data on File.
- Internal Report: Evaluation of Fluid Absorption, Antimicrobial Activity and adherence to the wound bed of Cutimed sorbact. 2017.

